

## 1. 사용목적

본 제품은 멸균수를 기체 상태로 환자에게 직접 분무하는 기구이다.

## 2. 사용방법

### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 포장이 손상되었는지 확인한다.
- 2) 사용자는 사용 전 제품 설명서를 읽고 충분히 숙지하여야 한다.

### 나. 사용방법

#### 1) 001-40J, H00040CE, H00340CE, K00040CE

- ① 멸균수와 어댑터 포장을 제거한다.
- ② 어댑터를 멸균수에 끼우고 단단히 조인다.
- ③ 멸균수를 오픈하기 위하여 멸균수 위쪽 트리거를 딸깍 소리가 날때까지 위쪽으로 당긴다.

※ 주의사항: 어댑터를 비틀지 말아야 한다.

#### ④ 제품을 유량계(Flow-Meter)에 연결한다.

※ 주의사항: 너트를 과도하게 조이지 말아야 한다.

#### ⑤ 사용하기 전에 모든 포트를 닫고 알람소리가 들리는지 확인한다.

※ 주의사항: 알람소리가 나는 것은 멸균수 통에 압력이 과도하게 축적되었음을 나타냄으로, 제품에 막힘이나 고인 튜브가 없는지 확인한다.

#### ⑥ 멸균수 출력부분에 튜브를 부착한다.

#### ⑦ 유량계(Flow-Meter)의 전원을 켜고, 본 제품을 통하여 멸균수가 제대로 기체상태로 출력되는지 확인한다.

#### 2) H03128CE, H03133CE, H03728CE, H04128CE, 30228-01MO

- ① 멸균수와 어댑터 포장을 제거한다.
- ② 어댑터를 멸균수에 끼우고 단단히 조인다.
- ③ 천자 핀 끝에 있는 천자 핀 커버를 제거하고, 튜빙을 잡는다.
- ④ 멸균수 통의 천자 포트(Puncture Port) 안으로 천자핀을 삽입하고, 플랜지(Thumb flange)만 남을 때 까지 천자핀을 밀어 넣는다.
- ⑤ 제품을 유량계(Flow-Meter)에 연결한다.
- ⑥ 네블라이저 어댑터 배출구에 환자에게 맞는 적절한 튜브 또는 마스크를 연결한다.
- ⑦ 공기유입 조절기를 이용하여 원하는 산소 농도로 조절한다.
- ⑧ 유량계를 원하는 값으로 설정하고, 네블라이징된 기체의 흐름을 확인한다.
- ⑨ 멸균수가 튜브를 통해 흐를 때, 제품 사용 준비가 완료 되었음을 나타낸다.

### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 일회용 제품이므로, 재사용하지 않는다.

## 3. 사용 시 주의사항

### 가. 경고사항

- 1) 본 제품은 일회용제품으로, 재처리하는 경우 성능이 저하되거나 기능의 손실을 야기할 수 있다. 일회용 제품을 재사용할 경우 바이러스, 박테리아, 곰팡이 또는 Prionic 병원균에 노출될 수 있다. 또한 검증된 멸균 및 세척 방법은 본 제품에 적용되지 않으며, 소독, 멸균하여 사용할 수 없도록 설계되었다.
- 2) 프탈레이트는(Phthalate) 잠재적으로 독성이 있으므로, 프탈레이트가 함유된 의료제품은 임산부, 수유부, 유아 및 소아에게 일시적으로만 사용 해야 한다.

### 나. 일반적 주의사항

- 1) 모든 부품의 연결이 잘 이루어져 있는지를 철저히 확인한다.
- 2) 본 사용방법은 일반적인 사용에 관해 기술된 것이므로 환자가 특별한 조건을 가지고 있는 경우 의사의 지시에 따라 사용해야 한다.
- 3) 당사에서 제공하는 멸균수와 함께 사용하는 것이 권장된다.
- 4) 멸균수는 흡입치료(Inhalation Therapy)를 위한 것이며 비경구 투여용이 아니다.
- 5) 포장이 손상되었거나 개봉된 경우 사용하지 말아야 한다.

## 4. 보관 또는 저장방법

- 가. 실내(건조한 상온의 장소)의 진열장 등에 포장상태로 보관한다.
- 나. 보관 장소로서 고온 다습한 곳은 피한다.