

**1. 사용목적**

본 제품은 혈관 파워 인젝터(vascular power injector)로부터 카테터로의 조영제 주입을 위한 것으로 일반적인 혈 관내 중재적 시술시에 조영제 컨테이너와 Manifold등을 연결하여 조영제가 주입되는 통로가 된다.

**2. 사용방법**

조영제 컨테이너와 Manifold등을 연결하여 사용한다.

**3. 사용 시 주의사항**

가. 사용 시 주의사항

- 1) 본 제품은 멸균포장되어 있으므로, 포장에 개봉되거나 손상이 있는 제품은 사용하지 않는다.
- 2) 본 제품을 사용하기 전 내부에 공기가 찼는지 주의해서 살핀다. 사용전 내부의 모든 공기를 제거한다.
- 3) 본 제품을 너무 높은 온도에 노출시키지 않는다.
- 4) 사용 전 모든 부품이 잘 조립되어 있는지 살핀다.
- 5) 재멸균, 재사용하지 않는다.

**4. 보관 또는 저장방법**

가. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용 멸균 의료기기로 사용 후 재 멸균, 재사용을 금하고 반드시 폐기한다.