

1. 사용목적

본 제품은 환자에게 에어로졸화한 물입자를 포함한 공기, 산소 또는 공기와 산소의 혼합가스를 공급하기 위해 이용하는 마스크다.
보통 넓은 지름 튜브를 이용해 산소원 및 네브라이저에 접속한다.

2. 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품이 파손되었는지 확인한다.
- 2) 포장에서 제품을 꺼내어 이물질이 있는지 확인한다.
- 3) 환자의 상태가 편안하고 진료가 용이하도록 위치시킨다.
- 4) 환자에게 알맞은 크기의 제품을 선택한다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 마스크와 산소 공급 장치 및 Nebulizer에 Tubing을 부착한다.
① Nebulizer와 사용하는 경우, Nebulizer는 마스크 Inlet에 직접 연결할 수 있으며, Nebulizer 산소 공급 장치에 연결한다.
- 2) 필요시, 구성품 티피스를 사용하여, 마스크, Nebulizer, 산소투여용튜브카테터, 마우스피스 등을 연결한다.
- 3) 환자에게 처방된 적절한 Flow로 장비를 셋팅 한다.
- 4) 장비를 통해 Flow의 문제가 없는지 확인한다. Valve의 기능이 적절한지 항상 확인한다.
- 5) 환자의 목 부분과 코 아래의 스트랩 (Strap)을 두고, 환자의 얼굴에 마스크를 위치시킨다.
- 6) 마스크가 완전히 고정될 때까지 스트랩 (Strap)을 끝까지 당겨 고정시킨다.
- 7) 마스크에 있는 Aluminum reinforcement를 환자에 얼굴에 맞게 조정한다.
- 8) 셋팅된 산소 및 에어로졸이 환자에게 누수 없이 공급되는지 확인한다.

3. 사용 시 주의사항

가. 경고

- 1) 본 제품은 재 멸균하여 사용해서는 안된다.
- 2) 본 제품은 일회용 제품임으로 사용 후 반드시 폐기한다.
- 3) 본 제품의 커넥터 사이즈에 맞는 제품을 연결한다.
- 4) 항상 제품과 마스크가 잘 연결되어 있는지 확인한다

나. 주의사항

- 1) 모든 부분의 연결부분을 단단히 고정해야 하며, 특히 Tubing은 단단히연결되어야 하며, 마스크의 누설이 없는지 확인한다.
- 2) 높은 습도를 갖는 실내 공기를 사용해야 한다.
- 3) 모든 부분의 연결이 안전한지 확인한다.
- 4) 사용하는 동안 모든 밸브가 정상적으로 동작하고, 산소 Inlet 밸브의 문제가 없는지 확인한다.
- 5) 사용하기 전에 산소 Inlet 밸브를 통한 산소의 흐름을 반드시 확인한다.
- 6) 사용하기 전에 산소 및 공기 흐름 통로가 깨끗한지 확인한다.
- 7) 의사 또는 직접 관련된 사람에 의해 사용되어야 한다.
- 8) 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
- 9) 심한 충격으로 제품이 파손, 변형되었을 경우 사용하지 말아야 한다.
- 10) 제품의 교환 및 변경은 제조사만이 가능함으로 임의로 제품을 변형하지말아야 한다.
- 11) 제품은 항상 직사광선 및 습기 있는 곳을 피하여 보관되어야 한다.

4. 보관 또는 저장방법

가. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 일회용 제품으로 사용 후 반드시 폐기한다.
- 2) 본 제품의 사용기한은 5년이다.