

1. 사용목적

본 제품은 산소를 경비강 통하여 투여하기 위하여 사용하는 튜브·카테터이다.

2. 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품이 파손되었는지 확인 한다.
- 2) 포장에서 제품을 꺼내어 이물질이 있는지 확인한다.
- 3) 제품의 공기 누출을 유발하는 튜브의 손상이 있는지 확인한다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 본 제품은 산소 또는 공기/호흡 가스 전달 장치 등에 연결한다.
- 2) 포장에서 제품을 꺼내어 이물질이 있는지 확인한다.
- 3) 제품의 공기 누출을 유발하는 튜브의 손상이 있는지 확인한다.
- 4) 튜브를 기기에 단단히 연결한다.
- 5) 산소 호흡가스 등이 공급되는 동안 연결 상태 및 이상 유무를 지속적으로 확인한다.
- 6) 턱 아래 그리고 귀에 2개의 플라스틱 튜브를 콧구멍의 코 끝에 삽입한다.
- 7) 캐놀러가 고정 될 때까지 조심스럽게 슬라이드를 조정한다.
- 8) 사용이 끝난 후 인공호흡기 등 기기에서 제품을 제거하고, 제품은 반드시 폐기한다.

3. 사용 시 주의사항

가. 경고사항

- 1) 본 제품은 재멸균하여 사용해서는 안된다.
- 2) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용해서는 안된다.
- 3) 포장이 훼손 되었거나 제품에 이물질이 발견된 경우 사용하지 말아야한다.

나. 주의사항

- 1) 의사 또는 직접 관련된 사람에 의해 사용 되어야 한다.
- 2) 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
- 3) 심한 충격으로 제품이 파손, 변형 되었을 경우 사용하지 말아야 한다.
- 4) 제품의 교환 및 변경은 제조사만이 가능하므로 임의로 제품을 변형하지말아야 한다.
- 5) 제품은 항상 직사광선 및 습기 있는 곳을 피하여 보관되어야 한다.

4. 보관 또는 저장방법

가. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용 제품으로 사용 후 재사용을 금하고 반드시 폐기한다.
- 2) 본 제품의 유효기간은 5년이며, 유효기간이 지난 제품을 사용해서는 안된다.