

1. 사용목적

본 제품은 산소를 경비강 통하여 투여하기 위하여 사용하는 튜브.카테터이다.

2. 사용방법

가. 사용 전 준비사항

1) 제품 사용 전 손상여부 및 멸균여부 등을 면밀하게 확인한다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 가스 공급원에 산소 공급 튜브를 연결하고 처방된 유량으로 산소를 설정한다.
- 2) 기기 전체의 가스 흐름을 확인한다.
- 3) 튜브를 귀와 턱 아래에 위치하게 하고 캐놀라 팁을 비강에 삽입한다.
- 4) 캐놀라가 고정될 때까지 볼로 슬라이드를 부드럽게 조정한다.
- 5) 필요한 경우 캐놀라를 테이프로 환자 얼굴에 고정한다.

3. 사용 시 주의사항

가. 사용 시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 모든 연결이 확실하고 튜브를 통해 공기가 제대로 순환하는지 확인한다.
- 3) 본 제품은 보조 산소 공급을 목적으로 한다. 기기를 사용하는 동안 지속적인 양압(CPAP)을 피하도록 주의한다.
- 4) 본 제품은 일회용 의료기기로 재처리, 재사용하지 않는다.

4. 보관 또는 저장방법

가. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용 제품으로 사용 후 재사용을 금하고 반드시 폐기한다.
- 2) 극단적인 온도나 습도 조건에서 제품을 보관하지 않도록 한다.
- 3) 본 제품의 유효기간은 5년이며, 유효기간이 지난 제품을 사용해서는 안된다.